


QUICK GUIDE

SD A1cCare™
SD A1cCare HbA1c テストキット


1. テストストリップの検体滴下部を上向きにします。




2. テストストリップを分析装置のテストストリップスロットにセットします。

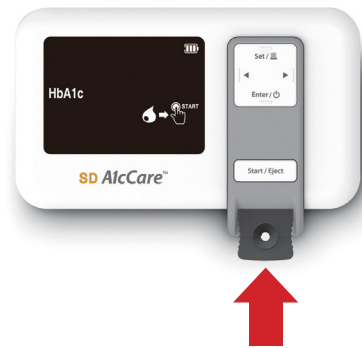


3. 血液検体を5μL採取します。

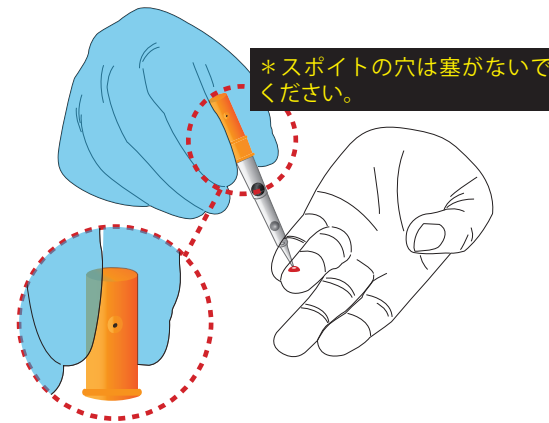


4. バッファチューブのアルミシールを剥がします。

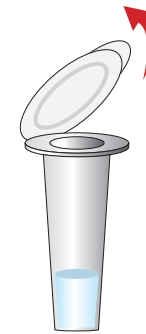


5. スポイトのゴム部分の穴を塞ぎます。

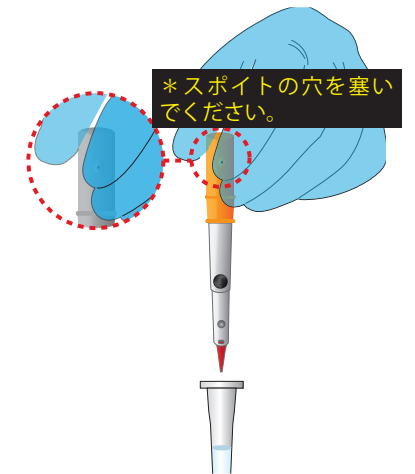

6. バッファチューブの緩衝液にスポイトの先端を浸す前に、血液検体を滴下します。

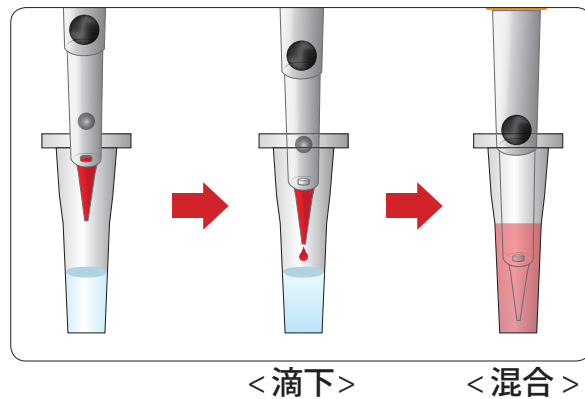


7. スポイトの先端を緩衝液に浸して、ゴム部分の穴を塞ぎながら6~8回押ししたり緩めたりして血液検体、緩衝液及びスポイトの内部のラテックスタブレットを泡立たないように混合し、検体溶液とします。

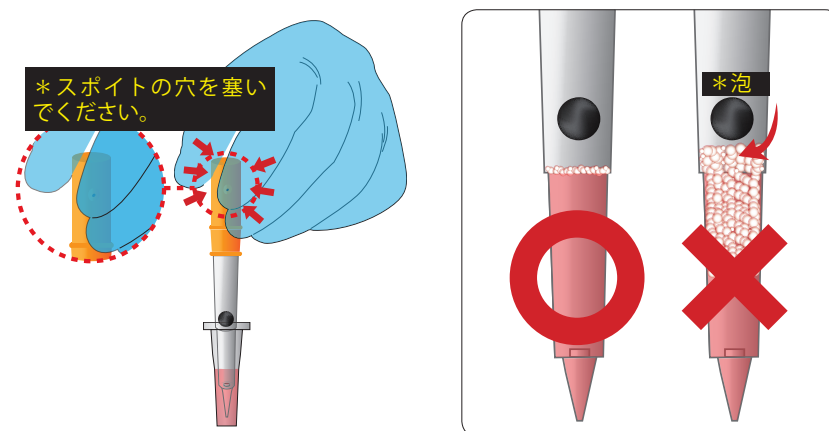

8. テストストリップの検体滴下部に検体溶液を全て注入します。



9. 「Start/Eject」ボタンを押します。

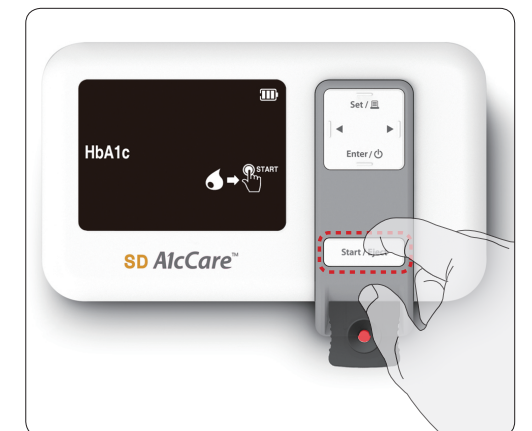

9. 測定結果が、3分後に画面に表示されます。



注意

- 使用済みのテストストリップ、バッファチューブ及びスポイトは医療機関、行政及び地方自治体の定める規則に従って適切に処理してください。
- 画面に表示された「eAG」の数値は、HbA1c(%)の測定結果から算出した推定平均血糖値になるため、測定結果を意味するものではなく参考値になります。