STANDARD Q

COVID-19 Agテスト

REF Q-NCOV-01G

研究用試薬 本製品は体外診断用委託品承認を取得しておりません。 検査を実施する前によくお読みください。

[製品構成] Rapid Test the sale Sile SED HE テストデバイス 25個 緩衝液 滅菌スワブ 取扱説明書 25本

[準備]

1 本書をよくお読みください。



2 アルミパウチに記載されている 有効期限をご確認ください。


期限切れの場合使用しないでください。



アルミパウチ内のテストデバイスと乾燥剤を確認してください。





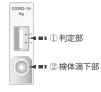

<テストデバイス>



< 乾燥剤 >

[使用方法]

鼻咽頭ぬぐい液を滅菌スワブを使用して採取します

1 スワブを鼻腔から下図の 咽頭後壁まで挿入します。

咽頭後壁表面にスワブを 当て粘膜表皮を採取します。

スワブを鼻腔から2cm程度 挿入します。

2 そのまま数秒間鼻腔に スワブを当て粘膜表皮を 採取します。


咽頭ぬぐい液を使用する場合 (別途咽頭用滅菌綿棒をご用意ください)

スワブを口腔から咽頭に 挿入します。

中咽頭、扁桃腺およびその他 の炎症部位を適度な力で3回 こすります。





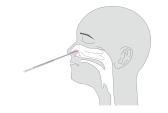


鼻腔ぬぐい液を滅菌スワブを使用して採取します





4 チューブの側面を押しながら スワブを5回まわします。



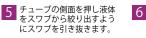

6 緩衝液チューブに ノズルキャップを 確実に取り付けます。

7 抽出された検体をテストデバイス の注入口に3滴滴下します。

15~30分の間に結果を 読み取ります。










結果読み取り 15-30分の間 30分以降



誤判定の恐れがあります

[検査結果の判定]

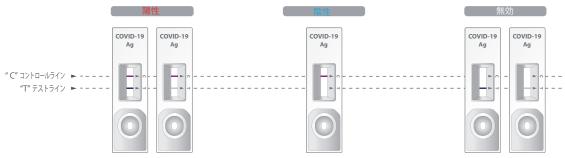



・抗原検査は発症後1週間以内をめどに実施してください。

・判定にはPCR検査との併用が必要です。

製造元

SD BIOSENSOR

C-4&5Floor, 16, Deogyeong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, REPUBLIC OF KOREA Tel +82-31-300-0400 | Fax +82-31-300-0499

輸入販売元

株式会社 マルコム

〒151-0071

東京都渋谷区本町4-15-10 e-mail: mdinfo@malcom.co.jp URL: http://www.malcom.co.jp



20201126