




		RT-PCR _c		
		94	7	101
		12	287	299
		106	294	400

		51	0	51
		2	107	109
		53	107	160




製品構成

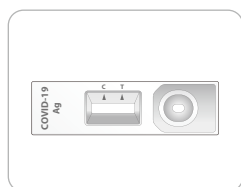


テストデバイス



緩衝液チューブ

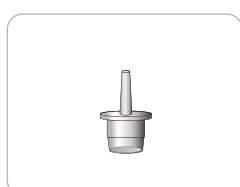

ノズルキャップ

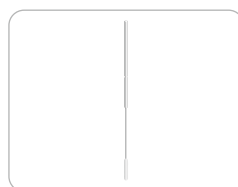


滅菌スワブ

使用方法


鼻咽喉頭ぬぐい液を滅菌スワブを使用して採取します

- 1 スワブを鼻孔から下図の咽喉後壁まで挿入します。
- 2 咽喉後壁表面にスワブを5秒間当て粘膜炎を採取します。

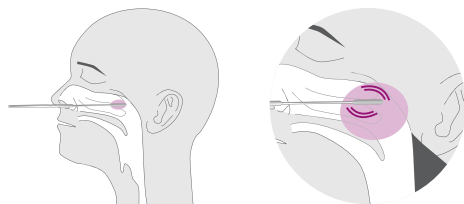


鼻腔ぬぐい液を滅菌スワブを使用して採取します

- 1 スワブを鼻腔に沿って2cm程度挿入します。
- 2 5回程度回転させ検体を採取します。

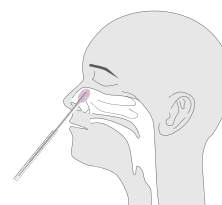


- 3 緩衝液チューブの側面を押しながらかスワブを5回まわします。

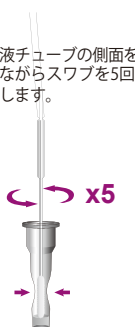


- 4 緩衝液チューブの側面を押し液体をスワブから絞りだすようにし引き抜きます。



- 5 緩衝液チューブにノズルキャップを確実に取り付けます。

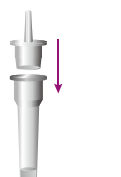


- 6 テストデバイスの検体滴下部に3滴滴下します。

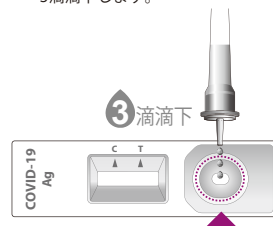

- 7 15~30分の間に結果を読み取ります。



テスト結果判定

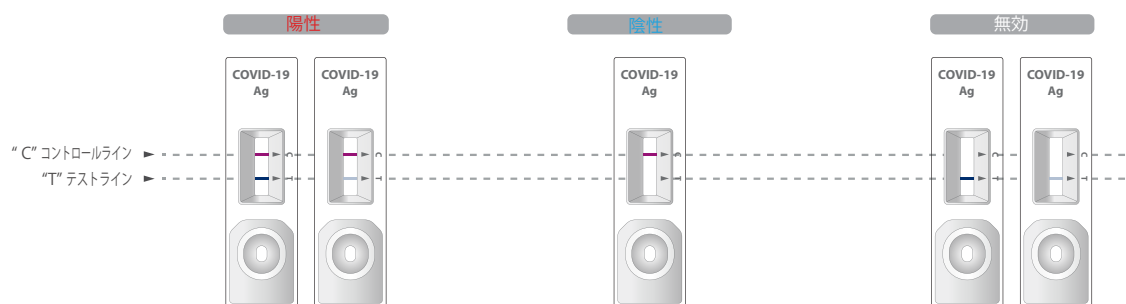

製品構成

製品名	キット入数	キット内容	標準価格
新型コロナウイルス抗原検査キット スタンダードQ COVID-19 Ag	25テスト/箱	テストデバイス 25個 滅菌スワブ 25本 緩衝液チューブ・キャップ 25個 フィルム 28枚 添付文書 1部 ※テストデバイスはアルミパウチに乾燥剤と同封されています。	¥ 35,750- (税込)

製造元

SD BIOSENSOR

C-4&5Floor, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Tel +82-31-300-0400 | Fax +82-31-300-0499

輸入販売元

株式会社 **マルコム**
〒151-0071
東京都渋谷区本町4-15-10
e-mail: mdinfo@malcom.co.jp
URL: http://www.malcom.co.jp

製品に関するお問い合わせ先
マルコム コールセンター
0120-901-656
9:00 ~ 18:00 土日祝日を除く

20211020